

# АкваТорнадо

Подводная вакуумная терапия

<a href="#">ГЛАВНАЯ</a>	<a href="#">НОВОСТИ</a>	<a href="#">МЕТОДИКА</a>	<a href="#">ТЕХНОЛОГИЯ</a>	<a href="#">ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ</a>	<a href="#">ДИЛЕРЫ</a>	<a href="#">СТАТЬИ</a>	<a href="#">КОНТАКТЫ</a>	<a href="#">ГЕОГРАФИЯ</a>
-------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------



Вы здесь: [Home](#) ► [Тех. документация](#)

## НОВОСТИ

**Клинические рекомендации**  
27.12.2012  
Аннотация В работе представлен опыт применения подводного вакуумного гидромассажа от аппарата «АкваТорнадо» у... [Read More...](#)

## ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ



## СЧЕТЧИК

15194
Сегодня 14
Вчера 33
На этой неделе 14
В этом месяце 884
За все время 15194



## Сотрудничество? Да!



У Вас свой SPA-салон? Санаторий? Клиника?

## Тех. документация и сертификаты

### АППАРАТУРНЫЙ КОМПЛЕКС ПОДВОДНОГО ВАКУУМНОГО МАССАЖА «АкваТорнадо»

#### Общие сведения

Аппаратурный комплекс подводного вакуумного массажа «АкваТорнадо» ПВМ-01 (далее «установка» или «изделие») – это multifunctional физиотерапевтическое оборудование комплексного воздействия, предназначенное для осуществления совокупного водного, теплового, вакуумного и контактного воздействий на ткани и органы пациента в процессе проведения процедуры подводного вакуумного массажа за счет формирования локального разряжения в специальных вакуумных насадках. Применение подводного вакуумного массажа усиливает крово- и лимфообращение, обменные и трофические процессы в тканях, положительно влияет на состояние нервно-мышечного аппарата, способствует рассасыванию рубцов и спаек, нормализует функцию больного органа и через центральную нервную систему вызывает специфические реакции во внутренних органах и в организме в целом.

Области применения установки: профилактические, оздоровительные, спортивно-оздоровительные, косметические, и другие аналогичные учреждения. Изделие используется для массажа всего тела или его частей водой, под водой с помощью вакуумной насадки, расположенной на конце шланга. Гидромассажный эффект вызван действием закрученной по спирали струи воды, которая создает разрежение в центральной камере вакуумной насадки. Изделие используется при восстановлении состояний пациентов после травм, ранения мышц и суставов, при несовершенном кровообращении в конечностях. Изделие сконструировано для работы в «мокрой» среде и подключается к обычной водопроводной сети.

Аппаратурный комплекс подводного вакуумного массажа «АкваТорнадо» ПВМ-01 обеспечивает щадящее воздействие на эпидермис, дерму, подкожную клетчатку, сосуды, мышцы, стимулируют работу ионных каналов мембраны клеток, способствуют выведению крупных грубодисперсных белков, аминокислот, липидов, удалению продуктов обмена веществ за счет мягкого лимфодренажного действия и повышенного кровенаполнения зоны воздействия в сочетании с принудительным раскрытием пор кожи. Режимы работы аппаратного комплекса подводного вакуумного массажа «АкваТорнадо» ПВМ-01 обеспечивают противовоспалительное, дезинтоксикационное действие, питание кожи кислородом, нормализуют работу сальных желез кожи, что очень важно при жирной коже, стимулируют выработку нейрوليлипидов-эндоморфинов, «гормонов радости». Сочетание водной и вакуумной терапии дает эффект глубокой очистки кожи, тонизирует гладкую мускулатуру пор кожи, гладкомышечные волокна сосудов, нервные окончания. Как результат - улучшается тургор кожи и ее эстетические свойства, происходит очистка и раскрытие пор кожи, возрастает кровенаполнение в области воздействия. В сочетании с вакуумным воздействием успешно применяются также водные растворы специально подобранных препаратов для разглаживания морщин, стимуляции сухой и регенерации стареющей и проблемной кожи тела. В косметологии аппарат незаменим для выполнения общего вакуумного массажа и в качестве средства, усиливающего действие косметических препаратов. Вакуумный массаж проводится как отдельно, так и в сочетании с точечным или классическим массажем.

Применение аппаратного комплекса подводного вакуумного массажа «АкваТорнадо» ПВМ-01 наиболее эффективно для:

- восстановления нервной системы;
- нормализации артериального и венозного давления;
- улучшения кровоснабжения усталой и проблемной кожи;
- коррекции веса (лечения целлюлита);
- мышечного расслабления, восстановления сил после тяжелой физической или умственной нагрузки;
- оказания антидепрессивного и антистрессового действия;
- повышения иммунитета;
- стимулирующего действия на органы кровообращения;
- снижения синдрома абстиненции («похмелья»).

Конструктивно комплекс состоит из установки подводного вакуумного массажа «АкваТорнадо» ПВМ-01 с вакуумной насадкой, пультом управления и ванны, как адаптированной уже имеющейся у Заказчика или специально разработанной для данного комплекса, поставляемой по отдельному заказу.

Климатическое исполнение изделия соответствует требованиям УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации в закрытых помещениях:

- в диапазоне температур от +20С до +40С;
- при атмосферном давлении 8.4x104 – 10.6x104 Па (650 - 800 мм рт. ст.)

#### Технические характеристики

Нам есть что обсудить - с аппаратом подводной вакуумной терапии ваш бизнес неизбежно пойдет в гору!

Подробнее о сотрудничестве и покупке аппарата "АкваТорнадо" - [здесь!](#)

- Емкость ванны, литров, не менее, л 300
- Температура воды, С 34 – 38
- Время выполнения процедуры, мин 40 – 45
- Время подготовки установки к работе, мин 10 – 15
- Производительность установки, пациентов в смену 7 – 10
- Производительность кругового водообмена, л/с 0.2 – 0.4
- Давление в гидросистеме, МПа (атм.) 0.2 – 0.7 (2 – 7)
- Разряжение, создаваемое в насадке, АД 0.3 – 0.9
- Электропитание, В/Гц 220/50
- Потребляемая мощность, Вт 1200
- Ток защиты УЗО, А 25
- Ток утечки УЗО, mA 30
- Степень защиты от воздействия окружающей среды IPX5

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не менее:

- установка ПВМ-01 с пультом управления 490х340х700
- ванны (поставляется отдельно) 2000х1000х600

Масса, кг:

- установка ПВМ-01 с ПУ 45
- ванны (поставляется отдельно) 100

Срок службы изделия, лет 10





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАРОВООХРАНЕНИЯ  
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ**  
**№ ФСР 2010/09512**

от 22 декабря 2010 года Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано

**ЗАО "НИКФИ", Россия, 109044, Москва, ул. 2-я Дубравская, д.4**  
и подтверждает, что изделие медицинского назначения  
(изделие медицинской техники)

**Аппаратный комплекс подводного вакуумного массажа "АкваТорнадо"**  
**по ТУ 9444-015-75563318-2010**  
производства

**ЗАО "НИКФИ", Россия, 109044, Москва, ул. 2-я Дубравская, д.4**  
класс потенциального риска 2а ОКП 94 4400

соответствующее комплекту регистрационной документации

**КРД № 67034 от 29.10.2010**

приказом Росздравнадзора от 22 декабря 2010 года № 11352-Пр/10  
разрешено к производству, продаже и применению на территории Российской Федерации

Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения  
и социального развития  **Е.А. Тельнова**  
**011522**



<b>СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р</b>	
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ	
	<b>СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ</b>
№ РОСС RU.ME67.H00958	Срок действия с 18.12.2012 по 17.12.2015
	№ 0061046
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.0001.11ME67 ПРОДУКЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ открытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "ЦИКЛОН-ТЕСТ" 141190, г. Фрязино Московской обл., Заводской проезд, д. 4, тел./факс (495) 995-72-07	
<b>ПРОДУКЦИЯ</b> Аппаратный комплекс подводного вакуумного массажа «АкваТорнадо» Технические условия ТУ 9444-015-75563318-2010 Серийный выпуск	код ОК 005 (ОКП): 94 44 00
<b>СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ</b> ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50444-92 (Р, 3, 4), ГОСТ Р 50267.0.4-99, ГОСТ Р 50267.0.2-2005	код ТН ВЭД России:
<b>ИЗГОТОВИТЕЛЬ</b> ЗАО «Новый Институт Кино-Фото Индустрии», Россия, ИНН 7709583482 109044, г. Москва, ул. 2-я Дубровская, дом 4	
<b>СЕРТИФИКАТ ВЫДАН</b> ЗАО «Новый Институт Кино-Фото Индустрии», Россия, ОКПО 75563318 109044, г. Москва, ул. 2-я Дубровская, дом 4	
<b>НА ОСНОВАНИИ</b> протоколов испытаний: № 1120-1-12 от 05.12.2012, ИЛ ОАО НПП «Циклон-Тест» (атт. аккр. № РОСС RU.0001.21MO46) № 1120-2-12 от 05.12.2012, ИЛ ОАО НПП «Циклон-Тест» (атт. аккр. № РОСС RU.0001.21MO16)	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b> Схема сертификации – 3. Маркировка продукции производится знаком соответствия по ГОСТ Р 50450-92 рядом с товарным знаком изготовителя на изделии, упаковке и в документации.	
	Руководитель органа А.Ю. Тарасов Эксперт Л.М. Иванова
Сертификат не применяется при обязательной сертификации	

